

Transfert Carony



AMÉNAGEMENT CONFORME AUX DIRECTIVES 2005/39, 40, 41, SUR DE NOMBREUX VÉHICULES. LE TRANSFERT CARONY EST PROPOSÉ AVEC UN SIÈGE AUTOMOBILE ERGONOMIQUE **RECARO**, RECONNU POUR SON CONFORT, QUI SE DÉCLINE EN 2 VERSIONS : SOIT ASSISE PLATE, SOIT ASSISE AVEC MAINTIEN LATÉRALE.

LE TRANSFERT S'EFFECTUE SANS JAMAIS QUITTER LE SIÈGE, ÉVITANT AINSI DE NOMBREUSES MANIPULATIONS.

A L'AIDE D'UN SIÈGE CONFORTABLE, LE TRANSFERT PEUT ÊTRE RÉALISÉ DE L'INTÉRIEUR VERS L'EXTÉRIEUR, D'UN VÉHICULE DE TYPE BERLINE, SUR UNE EMBASE ROULANTE QUI DEVIENT AINSI UN VRAI FAUTEUIL ROULANT.

DISPONIBLE AVEC ROUES Ø 600(24").



DESCRIPTION DU TRANSFERT VERS L'EXTÉRIEUR

- LE SIÈGE DU VÉHICULE PIVOTE.
- UNE TIERCE PERSONNE PRÉSENTE L'EMBASE MONTÉE SUR ROUES DEVANT LE SIÈGE, AVEC POSSIBILITÉ DE RÉGLER LA HAUTEUR DES GLISSIÈRES.
- EN AGISSANT SUR LA MANETTE DE TRANSFERT, LE SIÈGE GLISSE SANS EFFORT SUR L'EMBASE ET VIENT SE BLOQUER EN BONNE POSITION A L'EXTÉRIEUR DU VÉHICULE.
- LE TRANSFERT EST RÉALISÉ.



DESCRIPTION DU TRANSFERT VERS L'INTÉRIEUR

- APRÈS AVOIR OUVERT LA PORTE DU VÉHICULE ET FAIT PIVOTER LE PLATEAU TOURNANT, IL SUFFIT DE PRÉSENTER LE FAUTEUIL ROULANT EN POSITION ARRIÈRE JUSQU'À POUVOIR LE CLIQUETER SUR LE PLATEAU TOURNANT, AVEC POSSIBILITÉ DE RÉGLER LA HAUTEUR DES GLISSIÈRES.
- LE SIÈGE EST LIBÉRÉ DE SON EMBASE LORSQUE L'ON ACTIONNE LA MANETTE DE TRANSFERT.
- IL GLISSE A L'INTÉRIEUR DU VÉHICULE SANS EFFORT ET VIENT SE BLOQUER SUR LE PLATEAU TOURNANT.
- LE SIÈGE PIVOTE ENSUITE ET VIENT SE METTRE EN POSITION PASSAGER.
- ATTACHEZ LA CEINTURE, VOUS POUVEZ PARTIR !



LE CARONY PEUT RECEVOIR UNE MOTORISATION

- BONNE AUTONOMIE.
- CONDUITE SOUPLE.
- EXCELLENTE MANIABILITÉ.



- MOTORISATION LÉGÈRE, DÉMONTABLE FACILEMENT ET ADAPTABLE POSTÉRIEUREMENT À L'ACHAT DU CARONY.

LE SYSTÈME TILDA PERMET UN MEILLEUR TRANSFERT GRÂCE AU BASCULEMENT DE L'ASSISE DANS LE VÉHICULE. SPÉCIALEMENT RECOMMANDÉ SUR LES VÉHICULES 4 PORTES.



auto
ADAPT REV

pimas
Créateur d'autonomie

pimas
Créateur d'autonomie

14, rue Louis Aragon - 69120 VAULX-EN-VELIN - Tél. : 04 78 80 91 67
Site Internet : www.pimas.fr - E-mail : info@pimas.fr